

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для застосування медичного виробу  
**АНТИСЕПТИЧНИЙ РОЗЧИН ХІЛЕР ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ТА ЗАГОЄННЯ РАН**  
**HEALER MEDICAL®**

**Призначення.**

Стерильний, прозорий, безбарвний, майже без запаху, готовий до застосування розчин для очищення, промивання та зволоження гострих/хронічних, у т. ч. інфікованих ран і опіків.

Коротко про дію. Комбінація бетаїну (ПАР, руйнує/знімає забруднення й біоплівки) та РНМВ (полігексаметиленбігуанід гідрохлорид; має широкий антимікробний ефект, сумісний із грануляціями, практично не всмоктується). Ефективний проти грам(+) і грам(-) бактерій (аеробних/анаеробних), у т. ч. госпітальних штамів, окремих вірусів і грибів.

**Сфера застосування.**

**Гострі неінфіковані та інфіковані рани:** посттравматичні рани (подряпини, рвані, колото-різані, кусані, розчавлені) післяопераційні рани.

**Хронічні рани:** трофічні виразки (венозні/артеріальні), діабетична стопа, пролежні, складні/глибокі/важкодоступні.

**Опіки:** термічні, хімічні I–III ст.

Інші ураження: радіаційні рани, нориці/абсцеси, навколо стом, вхідні отвори катетерів/дренажів (PEG/PEJ тощо).

**Хірургія:** інтраопераційне зрошення; інстиляція при NPWT; змочування пов'язок перед зняттям. Може застосовуватись перед нанесенням Хілер гелю для загоєння ран та опіків HEALER MEDICAL® (див. окрему інструкцію).

Дозволяє зменшити неприємний запах із рани.

Також рекомендований для гігієнічної та хірургічної обробки рук медперсоналу.

**Спосіб застосування.**

Для прискорення загоєння поверхню рани слід ретельно очистити від некротичних тканин, фібрину та біоплівок - це сприяє більш ефективному відновленню. Для досягнення оптимального результату рану необхідно промити або обробити тампоном, рясно змоченим антисептичним розчином Хілер для оброблення та загоєння ран HEALER MEDICAL®;

З метою зниження ризику контамінації патогенною мікрофлорою рекомендується обробляти максимально велику площу шкіри або слизової оболонки навколо рани.

Марлеві серветки, змочені антисептичним розчином Хілер для оброблення та загоєння ран HEALER MEDICAL®, слід залишати на рані щонайменше на 15 хвилин або до наступної перев'язки - залежно від клінічної ситуації.

Якщо пов'язки адгезували (прилипли) до поверхні рани, їх слід рясно змочити антисептичним розчином Хілер для оброблення та загоєння ран HEALER MEDICAL® до повного зволоження, після чого вони легко знімаються без пошкодження ранової поверхні та грануляційної тканини.

Для більшого комфорту під час застосування антисептичним розчином Хілер для оброблення та загоєння ран HEALER MEDICAL® може бути підігрітий до температури тіла безпосередньо перед використанням.

Підходить для промивання порожнин через дренаж.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до будь-якого компонента.

Введення у ЦНС або контакт з оболонками мозку.

Порожнина середнього/внутрішнього вуха.

Слизова ока.

Гіаліновий хрящ, асептична хірургія суглобів (при випадковому контакті - негайно промити Рінгером або 0,9 % NaCl).

Поєднання з аніонними ПАР.

**Застереження.**

Не змішувати та не застосовувати одночасно з іншими антисептиками, мазями, оліями, ПАР, ферментами тощо; попередні засоби ретельно змити.

Не використовувати для полоскання/промивання очеревини.

Уникати потрапляння в очі.

Не для інфузій/ін'єкцій. Лише для зовнішнього застосування.

**Побічні реакції.**

Можливе короткочасне легке печіння; дуже рідко - алергічні реакції (висип, кропив'янка).

**Обмеження.**

Достовірні дані щодо мутагенної/тератогенної дії відсутні. Системне всмоктування РНМВ мінімальне; потрапляння в грудне молоко малоймовірне. Застосування у вагітних і дітей раннього віку - лише якщо очікувана користь переважає ризики.

**Склад.**

Полігексаметиленбігуанід гідрохлорид (РНМВ) - 0,15%; поверхнево-активна речовина бетаїн - 0,1%; вода очищена.

**Форма випуску.**

Полімерний флакон 120 мл (ml) з дозуючою насадкою і кришкою з контрольним кільцем першого відкриття, що пакується в індивідуальну коробку.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від +2 °С до +35 °С.

Після використання — щільно закривати, щоб запобігти контамінації, уникати забруднення горловини.

Флакони, що контактували з раною або були забруднені іншим чином, необхідно утилізувати.

**Термін придатності.**

3 роки від дати виготовлення. Дата виготовлення відповідає номеру партії.

**Виробник.**

ТОВ «ХІЛЕР», Політехнічний провулок, 1/33-А, м. Київ, 03055, Україна.

Tel: +380 800 33 31 31 info@healer.bio www.healer.ua

Дата останнього перегляду інструкції 20.10.2025 р.



Виробник



Номер партії



Використати до



Читайте  
інструкцію для  
застосування



Метод  
стерилізації  
радіаційний



UA.TR.098

Знак відповідності  
технічному  
регламенту