

ІНСТРУКЦІЯ
для застосування медичного виробу

ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ HEALER® PROFESSIONAL

Призначення.

Засіб дезінфекційний HEALER® Professional - медичний виріб призначений для дезінфекції виробів з різних матеріалів (металу, скла, полімерних матеріалів, гуми), включаючи хірургічні, гінекологічні, офтальмологічні, мікрохірургічні та стоматологічні інструменти, гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них, а також інші медичні вироби та обладнання, що підлягають подальшій передстерилізаційній обробці та стерилізації відповідно до встановлених процедур. Виріб може застосовуватися для дезінфекції аптечного та лабораторного посуду й інструментарію в закладах охорони здоров'я, клініко-діагностичних, бактеріологічних, вірусологічних та серологічних лабораторіях. Крім того, виріб може застосовуватися для дезінфекції медичного обладнання, а саме діагностичного обладнання (наприклад, комп'ютерних томографів, магнітно-резонансних томографів), датчиків ультразвукових діагностичних систем, моніторів пацієнта та іншого обладнання, у тому числі чутливого до оброблення спиртовмісними засобами. Також виріб придатний для дезінфекції дрібних медичних інструментів і виробів, таких як термометри, пінцети, ножиці, лотки, затискачі, шпатели та інші допоміжні медичні інструменти. Засіб дезінфекційний HEALER® Professional володіє бактерицидною дією по відношенню до грампозитивних (включаючи мікобактерії туберкульозу) та грамнегативних бактерій, віруліцидною дією до вірусів, зокрема – вірусів гепатиту В та С, вірусу грипу, вірусу імунodefіциту людини, кору, епідемічного паротиту, ротавірусних гастроентеритів, вірусів ЕCHO, Коксакі, коронавірусів людини, в тому числі SaRS-CoV-2, що викликає COVID-19, риновірусів, вірусів герпесу, цитомегаловірусу, вірусів пташиного грипу A(H5N1), фунгіцидними (включаючи кандидози, дерматофітії). Має широкий спектр антимікробної дії по відношенню до транзитornoї і резидентної мікрофлори.

Легко змивається водою, не чинить окислюючої, корозійної та пошкоджувальної дії на об'єкти обробки, виготовлені із металів, скла, гуми, а також на поверхні приладів та устаткування з лакофарбовим, гальванічним, полімерним покриттям.

Є вибухобезпечною та негорючою речовиною. Нелеткий та стабільний.

Сфера застосування.

- Дезінфекція інвазивних медичних інструментів із подальшою передстерилізаційною обробкою та стерилізацією.
- Дезінфекція середнього рівня неінвазивних медичних виробів.
- Обробка медичних виробів та обладнання (метал, скло, пластик, гума, силікон, полімери, кераміка), включно з чутливими до спиртів матеріалами.
- Дезінфекція поверхонь медичних виробів та обладнання в закладах охорони здоров'я або в інших установах, де застосовуються підвищені гігієнічні вимоги.
- Для екстреної дезінфекції та очищення поверхонь обладнання, виробів медичного призначення, технологічного устаткування, об'єктів громадського, медичного, харчового, комунально-побутового призначення та інших епідеміологічно значимих об'єктів.

Спосіб застосування.

Час експозиції відповідно до знезараження інфекційного агенту

Вид інфекції	Стандарт	Експозиція
Бактеріальні, вірусні, мікози (без мікобактерій туберкульозу)	ДСТУ EN 13727:2012, ДСТУ EN 13624:2019, Методичні рекомендації (наказ МОЗ № 231 від 08.04.2009)	5 min (хв)
Бактеріальні, вірусні, мікози (включаючи мікобактерії туберкульозу)	ДСТУ EN 14348:2014	15 min (хв)

Для оброблення медичних інструментів,

1. Засіб дезінфекційний HEALER® Professional наливають у чисту ємність, кількість якого має забезпечувати повне занурення виробів.

2. Медичні інструменти повністю занурюють, заповнюючи канали та порожнини за допомогою піпеток або шприців. Повітряні бульбашки необхідно видалити.

- Роз'ємні інструменти обробляють у розібраному вигляді.
- Вироби із замковими частинами (ножиці, корнцанги, зажими тощо) занурюють у розкритому стані та кілька разів розмикають у розчині для кращого проникнення.
- Товща шару розчину над виробами – не менше 1 cm (cm).

3. Вироби витримують у розчині не менше 5 хвилин. В умовах поширення *Mycobacterium terrae*, для туберкулоцидної дії мінімальний час експозиції – 15 хвилин.

4. Інструменти ретельно промивають стерильною або кип'яченою водою, що відповідає санітарним вимогам. Потім вироби висушують чистими серветками або на повітрі.

Робочий розчин можна використовувати повторно, якщо він зберігає прозорість і не має ознак забруднення (зміни кольору, нальоту, осаду). При перших ознаках змін необхідно замінити розчин на свіжий.

Продезінфіковані та висушені інструменти зберігають у чистих, сухих умовах у спеціально відведеному місці до подальшого використання або стерилізації.

Для оброблення медичних приладів без візуальних ознак забруднення

Перший метод. Медичні прилади з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям протирають ганчір'ям, змоченим у розчині засобу з розрахунку 75-100 ml/m² (мл/м²). Залишають на відповідний час експозиції.

Другий метод. Розчин засобу за допомогою тригера рівномірно нанести на медичний виріб з відстані приблизно 30 см (см) (орієнтовно в 3-5 точках на 1 м² (м²), витрата розчину 50-75 ml/m² (мл/м²)). Після нанесення розчину, протерти тканинною або нетканою безворсовою серветкою, або губкою, і залишити на час експозиції залежно від необхідного антимікробного ефекту. Серветки після обробки зібрати у ємність, знезаразити і утилізувати за правилами поводження з медичними відходами.

Для оброблення медичних приладів з візуальними ознаками забруднення, зокрема, біологічними рідинами

1. Зовнішні частини протирають серветкою, змоченою розчином засобу (для цього розчин можливо розпилити безпосередньо на серветку). Серветку після обробки знезаразити і утилізувати за правилами поводження з медичними відходами.

2. Очищені частини рівномірно оросити засобом, після чого протерти тканинною або нетканою безворсовою серветкою або губкою і залишити на час експозиції залежно від необхідного антимікробного ефекту. Серветку після обробки знезаразити і утилізувати за правилами поводження з медичними відходами.

Змивати залишки засобу після оброблення не обов'язково, якщо поверхні не контактують зі шкірою людини. По закінченні часу дезінфекції, залишок розчину витирають вологою серветкою (якщо поверхні контактують зі шкірою людини).

Застереження.

Тільки для зовнішнього використання. Не застосовувати як спороцидний засіб. Всі роботи із засобом виконувати у добре провітрюваному приміщенні. При роботі із засобом використовувати захисні рукавички та захисні окуляри. Не застосовувати для електронних та внутрішніх компонентів обладнання. Не розводити. Не допускати до роботи осіб з підвищеною чутливістю до хімічних речовин та із хронічними алергічними захворюваннями.

Заходи першої допомоги при отруєнні

При випадковому попаданні засобу в шлунок необхідно випити кілька склянок води. При необхідності звернутися до лікаря.

При випадковому попаданні в очі, їх потрібно негайно промити проточною водою. В разі необхідності звернутися до лікаря.

Склад.

Діюча речовина: полігексаметиленбігуаніду гідрохлорид (PHMB) – 0,5%, допоміжні речовини (вода очищена, в тому числі амфотерні ПАВ).

Форма випуску.

Прозорий полімерний флакон місткістю 200 ml (мл), з тригером, каністра ПЕ 1000 ml (мл) та кришка, каністра ПЕ 5000 ml (мл) та кришка.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від +2 °С до +35 °С. Після використання щільно закривати, щоб запобігти контамінації, уникати забруднення горловини.

Термін придатності.

3 роки від дати виготовлення. Дата виготовлення відповідає номеру партії.

Виробник.

ТОВ «ХІЛЕР», Політехнічний провулок, 1/33-А, м. Київ, 03055, Україна.

Tel: +380 800 33 31 31 info@healer.bio www.healer.ua

Дата останнього перегляду інструкції 27.03.2026 р.



UA.TR.098

Виробник

Номер партії

Використати
до

Знак відповідності
технічному
регламенту