

Додаткова інформація про медичний виріб
РОЗЧИН АНТИСЕПТИЧНИЙ HEALER® З АРОМАТОМ МАЛИНИ, 1000 ml (мл)

Призначення

Розчин антисептичний HEALER® — медичний виріб для очищення та антисептичної обробки шкіри навколо поверхневих ушкоджень, післяопераційних швів і поверхневих опіків I–II ступенів, а також дрібних ушкоджень шкіри, обмежених епідермісом (садна, подряпини), що не потребують асептичних умов, з метою зниження мікробного навантаження та профілактики вторинної контамінації.

Виріб також використовується для гігієнічної та антисептичної обробки неушкодженої шкіри рук пацієнтів і медичного персоналу перед проведенням неінвазивних медичних маніпуляцій та надяганням медичних рукавичок.

Розчин проявляє антимікробну активність щодо транзиторної та резидентної мікрофлори шкіри та сприяє пригніченню розмноження мікроорганізмів до першого миття шкіри.

Допоміжні компоненти забезпечують м'яку дію на шкіру, підтримують її природний рівень зволоження та фізіологічний стан.

Сфера застосування

- поверхневі ушкодження шкіри (садна, подряпини);
- шкіра навколо ран і післяопераційних швів;
- поверхневі опіки I–II ступенів;
- антисептична обробка неушкодженої шкіри перед неінвазивними маніпуляціями;
- гігієнічна обробка рук медичного персоналу;
- догляд за шкірою стоп і нігтьових валиків як допоміжний гігієнічний засіб.

Спосіб застосування

Гігієнічна обробка рук:

Нанести не менше 3 ml (мл) розчину на суху неушкоджену шкіру рук, рівномірно розподілити по всій поверхні та втирати не менше 30 секунд. Дати висохнути природним шляхом. Медичні рукавички надягати лише на сухі руки.

Поверхневі ушкодження та опіки I–II ступенів:

Зросити уражену ділянку або обробити її чистим одноразовим марлевим тампоном, змоченим розчином. Забезпечити повне зволоження поверхні, витримати не менше 30 секунд, після чого дати висохнути природним шляхом. За потреби обробку повторити.

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого компонента виробу.

Контакт зі слизовою оболонкою очей.

Застосування у порожнині середнього та внутрішнього вуха.

Застосування при ураженнях центральної нервової системи.

Не застосовувати одночасно з аніонними поверхнево-активними речовинами.

Застереження.

Виріб нестерильний.

Не застосовувати безпосередньо на глибоких, кровоточивих або інфікованих ранах.

Лише для зовнішнього застосування.

Не використовувати для ін'єкцій або інфузій.

Уникати потрапляння в очі.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. При появі ознак індивідуальної чутливості застосування виробу слід припинити.

Обмеження

Застосування у вагітних жінок, жінок, які годують груддю, та дітей раннього віку рекомендоване лише у випадках, коли очікувана користь від застосування переважає можливі ризики.

Склад.

Полігексаметиленбігуанід гідрохлорид (PHMB), гліцерин, поліетиленгліколь, вода очищена.

Форма випуску.

Полімерний прозорий флакон 60 ml (мл) з пульверизатором та кришкою; каністра ПЕ 1000 ml (мл) з кришкою або дозатором; каністра ПЕ 5000 ml (мл) з кришкою.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла, недоступному для дітей місці при температурі від +2 °C до +35 °C.

Після використання щільно закривати упаковку для запобігання контамінації вмісту.
Уникати забруднення горловини флакона.

Термін придатності.

3 роки від дати виготовлення. Дата виготовлення відповідає номеру партії.

Виробник.

ТОВ «ХІЛЕР», Політехнічний провулок, 1/33-А, м. Київ, 03055, Україна.

Tel: +380 800 33 31 31 info@healer.bio www.healer.ua

Дата останнього перегляду інформації 20.10.2025 р.



Виробник



Номер партії



Використати
до



UA.TR.098

Знак відповідності
технічному
регламенту