

ІНСТРУКЦІЯ для застосування медичного виробу

ГІДРОГЕЛЕВА ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ РАН ТА ОПІКІВ HEALER GEL MEDICAL®

Інструкція з використання гідрогелевої пов'язки для захисту, зволоження, знезараження гострих, хронічних неінфікованих та інфікованих ран або опіків

Короткий опис.

Гідрогелева пов'язка для ран та опіків HEALER GEL MEDICAL® – медичний виріб основою якого є складні високомолекулярні сполуки до складу яких входять вуглеводи, сполуки білкової природи, та значна кількість іонів кальцію. Антисептичні властивості пов'язки забезпечує діюча речовина полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (PHMB). Використовується для захисту, зволоження, знезараження гострих, хронічних та інфікованих ран або опіків та запобіганню процесу контамінації ран різного походження.

Гідрогелева пов'язка HEALER GEL MEDICAL® створена на безспиртовій основі, прозора, еластична, добре моделюється на ураженій поверхні шкіри, має високу адгезію до суміжних з раною тканин і зовнішнього перев'язувального матеріалу, безболісно і цілком видаляється з рани при здійсненні перев'язок, служить ефективною перешкодою для потрапляння бактерій і мікрочастинок ззовні, усуває рановий ексудат не створюючи ризику мацерації, забезпечує уражене середовище постійною вологістю і низькою температурою, сприяє дифузії кисню до рани. Гідрогелеві властивості пов'язки підтримують нормальний осмотичний тиск клітин тканини, сприяють грануляції, епітелізації та аутолітичній санації ранової поверхні. Через вологу, що надходить до рани з гідрогелевої пов'язки, процеси грануляції та відновлення епідермісу спрощується. Крім цього, відчуття прохолоди, яке надає гідрогель рані, забезпечує зменшення больових відчуттів.

Функціональні допоміжні речовини гідрогелевої пов'язки для ран та опіків HEALER® GEL MEDICAL® зумовлюють виражену місцеву протизапальну та ранозагоюючу дію, пом'якшують та живлять шкіру, забезпечують її зволоження та еластичність.

Діюча речовина полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (PHMB) має виражену бактерицидну дію щодо грампозитивних та грамнегативних, аеробних та анаеробних бактерій у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, включаючи госпітальні штами, резистентні до антибіотиків. Медичний виріб ефективний щодо грампозитивних бактерій (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae* та ін.) та грамнегативних бактерій (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp. та ін.), діє на spp. , *Neisseria gonorrhoeae*), а також віруси герпесу, імунодефіциту людини та ін. Чинить протигрибкову дію на аскоміцети роду *Aspergillus*, дріжджові гриби та дріжджоподібні (*Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei* та ін.), дерматофіти у вигляді монокультур та мікробних асоціацій, включаючи грибкову мікрофлору з резистентністю до хіміотерапевтичних препаратів. Ефективно запобігає інфікуванню ран та опіків, активізує процеси регенерації.

Сфера застосування.

Гострі неінфіковані та інфіковані рани: посттравматичні рани (такі як подряпини, рвані або колоті, колото-різані, кусані, розчавлені рани), постопераційні рани, може ефективно використовуватися для будь-яких ранових поверхонь та післяопераційних швів.

Хронічні неінфіковані та інфіковані рани: діабетичні виразки, пролежні, трофічні виразки, зовнішні ураження шкіри, які є наслідками онкологічних захворювань, пошкодження шкіри при екземі та нейродерміті.

Термічні та хімічні опіки I-II та III ступенів.

Спосіб застосування.

Для отримання кращого результату перед накладанням гідрогелевої пов'язки HEALER GEL MEDICAL®, ділянку навколо рани слід очистити та обробити антисептичним розчином для оброблення та загоєння ран HEALER MEDICAL® (див. окрему інструкцію на розчин).

Розмір гідрогелевої пов'язки HEALER GEL MEDICAL® вибирають так, щоб вона була більшою по контуру, ніж уражена ділянка на 2 – 3 см, фіксують бинтом або будь-яким іншим перев'язувальним матеріалом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Гідрогелеву пов'язку для ран та опіків HEALER GEL MEDICAL® не слід використовувати у поєднанні з іншими антисептичними розчинами, мазями, маслами, ферментами тощо. Ці речовини слід видалити з поверхні рани, обробити рану антисептичним розчином HEALER MEDICAL® або фізіологічним розчином, та накласти гідрогелеву пов'язку.

Загальні інструкції щодо безпеки.

Слід уникати використання гідрогелевої пов'язки, коли рана надзвичайно зволожена або має сильний ексудат. Гідрогелеву пов'язку не використовують для обробки шкірних покривів осіб, які мають підвищену чутливість до компонентів засобу. Під час використання пов'язки уникати попадання гелю на слизові оболонки очей.

Лише для зовнішнього використання. Тримати в недоступному для дітей місці!

Склад: діюча речовина: полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (PHMB) 0,1%, допоміжні речовини: декспантенол, поліетиленгліколь, агар-агар, гліцерин, полівінілпіролідон, вода очищена.

Форма випуску.

Гідрогелева пов'язка HEALER GEL MEDICAL® виготовлена у вигляді листа гідрогелю, товщиною близько 2,5 мм (+/- 0,5 мм), вкладена в індивідуальне блістерне пакування (корекс), та трьохшовний пакет PELD pile effect, який захищає даний виріб від зовнішнього впливу небезпечних факторів, та запаюється.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2⁰С до 35⁰С.

Термін зберігання.

3 років з дати виготовлення.

Виробник:

ТОВ «ХІЛЕР» Політехнічний провулок,. 1/33-А, м. Київ, 03055, Україна

Tel: +380 800 33 31 31

info@healer.bio

www.healer.bio



Виробник



Номер партії



Дата
виробництва



Використати до



Читайте
інструкцію для
застосування



Повторно
використовувати
заборонено



Метод
стерилізації
радіаційний

